

Flytande rengöringsmedel för rengöring av medicinska instrument

Produktbeskrivning

Suma Med Alu är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel som är speciellt utformat för användning i ett brett sortiment av ultraljuds- och diskdesinfektorer.

Produktegenskaper

Suma Med Alu är ett flytande rengöringsmedel som är speciellt framtaget för användning i ett brett sortiment av ultraljudsmaskiner och diskdesinfektorer för många laboratorier och medicinska rengöringsverksamheter. Speciellt utformat för användning på mjuka metaller som aluminium, koppar eller silver.

Produktfördelar

- Säker för användning på aluminium och andra mjuka metaller
- Innehåller kraftfulla emulgerings- och dispergeringsmedel för att avlägsna fett- och proteinsmuts
- Lämplig för alla vattenförhållanden
- Den koncentrerade formuleringen ger utmärkt kostnadseffektivitet

Bruksanvisning

Suma Med Alu appliceras normalt med Diverseys automatiska doseringsutrustning. Den kan dock användas tillsammans med integrerade doseringspumpar där sådana finns. Vid första användningen, skölj pumpen och transportrören i doseringssystemet för att undvika eventuell kristallisering i dessa rör, orsakad av blandning av produkter. Torka den medicintekniska produkten före användning. Dessutom måste de medicintekniska produkterna steriliseras ytterligare om de är invasiva. Specialhandskar och skyddsglasögon eller skyddsglasögon krävs under normala användningsförhållanden.

Dosering*

För att säkerställa perfekta rengöringsresultat vid medelhårt vatten, dosera med en koncentration på 1,5-3 g/L, beroende på lokala förhållanden på platsen.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*

Användning


Suma Med Alu L10 är ett koncentrerat flytande maskindiskmedel som är speciellt framtaget för användning i ett brett utbud av ultraljudsmaskiner och tvätt- och desinfektionsmaskiner, eller som flytande tvättmedel för manuell tvätt. Speciellt framtagen för användning på mjuka metaller som aluminium, koppar eller silver. Kompatibel med rostfritt stål. Suma Med Alu L10 är en produkt för engångsbruk. Avsedda användare: auktoriserad utbildad personal på en sjukvårdsinrättning. Endast för professionell användning.



EU Ecolabel: SE/038/001



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

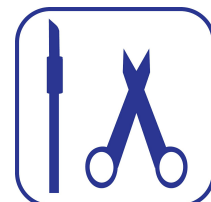

Teknisk information

Utseende:	Klar ljusgul vätska
pH koncentrat:	> 11.5
pH brukslösning (1% lösning vid 20°C):	> 11 (0.4 %)
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.27 (20 °C)

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

Varning

Om någon allvarlig incident inträffar i samband med användningen av Suma Med Alu ska användaren rapportera detta till det lokala Diverseykontoret och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Återanvänd inte. Produkten är inte avsedd för användning på mänsklig hud. Suma Med Alu är inte avsedd att användas på porösa eller alkalikänsliga medicintekniska produkter utom aluminium. Använd inte på medicintekniska produkter tillverkade av polyetentereftalat (PET). Utan korrekt sterilisering är produkten inte avsedd att användas på invasiva medicintekniska produkter som penetrerar vävnad eller tränger in i blodomloppet eller kommer i direkt kontakt med intakta slemhinnor. Använd inte Suma Med Alu L10 på medicintekniska produkter av plast. Andra användningsområden än de angivna rekommenderas inte. Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut. Tvätta ansikte, händer och all exponerad hud noggrant efter hantering. Ta omedelbart av alla kontaminerade kläder. Använd personlig skyddsutrustning efter behov. Använd endast med tillräcklig ventilation. Suma Med Alu L10 Innehåller dinatriummetasilikat (natriummetasilikat) och kan orsaka: Hudirritation Allvarlig ögonskada Försiktighetsåtgärder: Använd ögon- eller ansiktsskydd. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt sköljningen. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL, läkare eller sjukvårdspersonal.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100854033	Suma Med Alu L10 200L W1779	Automatisk dos
100854034	Suma Med Alu L10 2x5L W4040	Automatisk dos

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 20/03/2024 sv-SE (K00235)